

# Verpackungsanleitung TWINWARM BB

Stand: Juni 2024

Basierend auf Arbeitsanweisung BB5400de\_rev.03

DO507 Rev. 02

<b>Ziel</b>	Verpackung vom TWINWARM BB Gerät für den Transport mit Instapack-Schaumbeuteln
<b>Arbeitsmittel</b>	Verpackungsklebeband Packband-Handabroller
<b>a) Komponenten</b>	Versandkarton TWINWARM BB (Maße: 500 × 500 × 550 mm) (Art. Nr. V000034) Instapack-Schaumbeutel (3 Stück) (Art. Nr. V000038)
<b>b) Werkzeuge</b>	1. Optional: Seitenschneider
<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b>	 Sicherheit
	 Hinweis
	 Qualität / Ausführung

## Arbeitsablauf

Nr.	Ablaufschritt	Beschreibung	Schema / Foto
1	TWINWARM BB vorbereiten	<p>⚠ Sicherstellen, dass der Netzstecker gezogen wurde.</p>	
		Reparaturauftrag ausfüllen und ausdrucken.	
2	Schaumbeutel Platzierung	Die Instapack-Schaumbeutel werden folgendermaßen im Karton um das Gerät platziert.	
3	Schaumbeutel Platzierung	1) Unterpolster in den Karton legen.	
		2) Das Gerät in den Karton setzen. (Die Rollen passen in die Vertiefungen).	
		3) Das Oberpolster anschließend auf das Gerät setzen.	

4	Zubehör	Den Reparaturauftrag beilegen	
5	Karton verschließen	Den Karton mit geeignetem Kartonband verschließen.	
6	Prüfung	<p>◆ Sichtkontrolle für den Verpackungszustand des Gerätes durchführen. Ein Foto machen zum Nachweis bei evt. anfallenden Transportschäden.</p>	