

Instructions d'emballage TWINWARM BB

Statut: Juni 2024

Sur la base des instructions de travail BB5400de_rev.03

DO507 Rev. 02

TWINWARM® BB

Objectif	Emballage du dispositif TWINWARM BB pour le transport avec des sacs en mousse Instapack
Équipement de travail	Ruban d'emballage Distributeur manuel de ruban d'emballage
a) Composants	Boîte d'expédition TWINWARM BB (dimensions : 500 x 500 x 550 mm) (réf. V000034) Sac en mousse Instapack (3 pièces) (no. d'article V000038)
b) Outils	1. en option : coupeur latéral
Instructions générales de sécurité	 Sécurité
	 Note
	 Qualité / Exécution

Le processus de travail

Non.	Étape du processus	Description	Schéma / Photo
1	Préparer TWINWARM BB	<p>✚ S'assurer que la prise de courant a été débranchée.</p>	
		Remplir et imprimer l'ordre de réparation.	
2	Placement du sac de mousse	Les sacs de mousse Instapack sont placés dans la boîte autour de l'appareil comme suit.	
3	Placement du sac de mousse	1) Placez le coussin inférieur dans la boîte.	
		2) Placez l'appareil dans la boîte. (Les rouleaux s'insèrent dans les cavités).	
		3) Placez ensuite le coussin supérieur sur l'appareil.	

4	Autres accessoires	Joindre l'ordre de réparation	
5	Sceller la boîte	Scellez la boîte avec un ruban adhésif approprié.	
6	Examen des dossiers	◆ Vérifiez visuellement l'état de l'emballage de l'appareil. Prenez une photo comme preuve en cas de dommages dus au transport.	